



## Кровать общебольничная механическая КМ 07

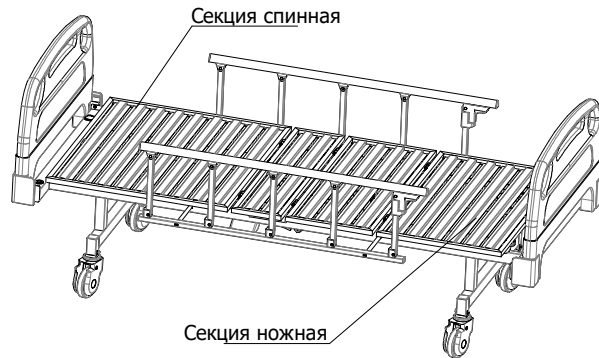

### Установка ножек

Соедините ножки кровати с основанием с помощью винтов M8x16 и гек M8.

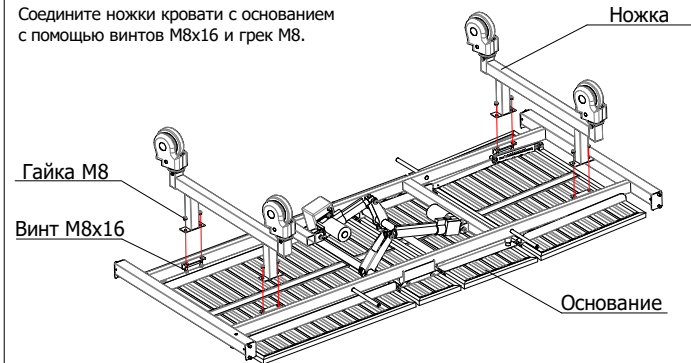

Закрепление провода заземления

Установка приводов

Установка блока управления

Привод тазобедренной секции



1

1. Соедините приводы с кронштейнами с помощью винтов M10x60 и гаек M10.
2. Блок управления следует установить на привод тазобедренной секции (полозья на приводе и на блоке). В порт № 1 подключить привод спинной секции, в порт № 2 привод тазобедренной секции, в порт № 3 пульт управления приводами.
3. Присоедините провод заземления

2

Примечание: колеса с тормозом устанавливать по диагонали.

### Установка спинок и боковых ограждений



3

Предварительно снять колпачки защитные с кронштейнов спинок